

## Guide préleveur

### Habillage et hygiène des mains

- Désinfecter les mains.
- Mettre la blouse de protection à usage unique.
- Mettre le masque FFP2.
- Mettre les lunettes de protection/visière.
- Mettre le couvre-chef.
- Désinfecter les mains.
- Mettre une première paire de gants (qui sera maintenu tout au long de la séance de test).
- Mettre une deuxième paire de gants (qui sera changée à chaque nouveau patient).

### Procédure de testing

- Vérifier date d'expiration du test.
- S'assurer du bon état du dispositif de test et contrôler la validité du sachet déshydratant (jaune).
- Effectuer le prélèvement.
- Placer l'écouvillon dans le tube de tampon d'extraction tout en pressant le tube de tampon.
- Remuer l'écouvillon plus de 5 fois.
- Appuyer fermement le bouchon canule sur le tube.
- Appliquer 3 gouttes extraites de l'échantillon sur le dispositif de test.
- Attendre le résultat du test (15' à 30'). Cross-checker le résultat avec la personne administrative de la « cellule de prélèvement ».