

Guide pour la personne administrative d'une « cellule de prélèvement »

Avant les tests

- Être équipé d'au moins une table pour poser au moins deux exemplaires du [support](#) A3 fourni par la FLT (Annexe 9).
- Avoir les supports A3 en réserve pour échanger les supports complétés au fur et à mesure.
- Être équipé d'un stylo et d'un GSM.
- Mettre un masque FFP2 et une paire de gants (la même pendant toute la séance de test !).

Pendant les tests

- Réceptionner les étiquettes des personnes à tester et les apposer sur le support A3 dans la case prévue à cet effet. Noter l'heure exacte du prélèvement dans la case prévue à cet effet.
- Poser le dispositif de test également sur le support A3 prévue à cet effet.
- Lire le résultat du test entre 15' et 30' après le prélèvement et encrer le résultat qui convient (négatif, positif, invalide). Cross-check avec le préleveur pour éviter toute mauvaise lecture de résultat.


Résultats négatifs



Une ligne dans "C" et PAS DE LIGNE dans "T" signifie que le SARS-CoV2 n'est PAS DÉTECTÉ.

Le résultat du test doit être interprété comme un résultat NÉGATIF.


Résultats positifs

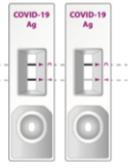

Une ligne dans "C" ET une ligne dans "T" signifient que le SARS-CoV2 est DÉTECTÉ.

Même si la ligne de contrôle est faible ou si la ligne de test n'est pas uniforme, le test doit être considéré comme ayant été effectué correctement et le résultat du test doit être interprété comme un résultat POSITIF.

Résultats invalides

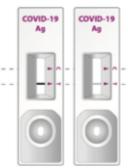

AUCUNE LIGNE dans "C" et une ligne ou aucune ligne dans "T" signifient que le test est INVALIDE.

Répétez le test en utilisant un nouveau dispositif (non ouvert) de test rapide de l'antigène SARS-CoV2 et un nouvel échantillon.

- En cas de test invalide, **immédiatement** appeler la personne concernée et la prévenir afin qu'elle puisse repasser un nouveau test.
- En cas de test positif, **immédiatement** appeler la personne concernée et la prévenir du résultat. Lancer immédiatement la procédure de déclaration de test positif.
- La FLT envoie tous les résultats de test négatif par email aux personnes concernées après réception des résultats de tous les centres de test.
- Le dispositif de test est évacué dans la poubelle « bio-hasard » fournie par la FLT.
- Tous les supports A3 complétés sont stockés de manière ordonnée.

Après les tests

- Prendre tous les supports A3 complétés et assister la personne de l'accueil général dans la tâche pour compléter la partie « résultat test antigénique » du journal de bord.
- Après finalisation de toutes les tâches, évacuer le masque et les gants dans un double sac poubelle.